



5. Absaugbeutel Serres[®] in den Sekretbehälter Serres[®] einsetzen. Dabei beachten: Die Folie des Absaugbeutels Serres[®] muss vollständig im Inneren des Sekretbehälters Serres[®] sein und der Deckel des Absaugbeutels Serres[®] muss den Sekretbehälter Serres[®] fest verschließen.
6. Gerät einschalten (siehe „4.6 Gerät einschalten“, Seite 62).
7. Vakuum von -0,8 bar wählen und von oben auf die Mitte des Absaugbeutels Serres[®] drücken. Der Absaugbeutel muss sich entfalten.
8. Weißen Winkelanschluss mit dem Finger verschließen. Der Absaugbeutel Serres[®] muss sich vollständig entfalten, bis er am Boden und an den Seiten des Sekretbehälters Serres[®] anliegt.
9. Einweg-Absaugschlauch an den weißen Winkelanschluss anschließen.
10. Wenn notwendig: Gerät ausschalten (siehe „4.7 Gerät ausschalten“, Seite 63).

6.2 Funktionskontrolle durchführen

6.2.1 Funktionskontrolle vorbereiten

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch beschädigtes oder nicht einsatzbereites Gerät!

Wenn Sie ein beschädigtes Gerät oder ein Gerät nach nicht bestandener Funktionskontrolle betreiben, kann es zu Verletzungen des Patienten kommen.

⇒ Nur unbeschädigtes Gerät betreiben.

⇒ Gerät immer nur nach bestandener Funktionskontrolle betreiben.

⇒ Beschädigtes Gerät instand setzen lassen.

Voraussetzung

- Ein Behältersystem ist montiert.
- Ein Absaugschlauch ist an das Behältersystem angeschlossen.

1. Folgende Teile auf äußere Beschädigungen prüfen:

- Gerät
- Zubehör zur Energieversorgung
- Schläuche
- Behältersystem

Wenn notwendig: Teile ersetzen.

2. Wenn vorhanden: Netz- und Ladegerät an eine 230-V-Netzversorgung anschließen.

Wenn die Kontrollleuchte nicht leuchtet: Netz- und Ladegerät ersetzen.

3. **Festen und richtigen Sitz von Schläuchen und Behältersystem prüfen.**

Wenn notwendig: Schläuche und Behältersystem richtig anschließen.

4. Klettverschluss des Tragegurts prüfen.

Wenn der Klettverschluss beschädigt oder durch Flusen verunreinigt ist: Tragegurt ersetzen.

Ergebnis

Die Funktionskontrolle ist vorbereitet.